



## GER

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## Ortho CLIP ÖFFNER

### 50-1032-0000

#### 1. ZUSAMMENSETZUNG UND AUFBAU

Klinge: Edelstahl (Fe, Cr, Mn, Ni)

Griff: Polypropylen




#### 2. EINSATZ, VERWENDUNGSZWECK

Dieses Produkt wird in der kieferorthopädischen Behandlung verwendet, um den Clip der selbstligierenden Experience C (Keramik) und Experience M (Metall) Brackets zu öffnen.

#### 3. ANWENDUNG


1. Führen Sie die kurze Spitze in die Kerbe in der Mitte des Clips ein. (Abb. 1)

(Abb. 1)

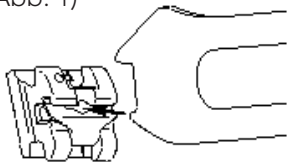

2. Schieben Sie die Spitze des Instruments nach okklusal (Abb. 2) bis die lange Spitze zwischen den Flügeln aufliegt. Dadurch wird verhindert, dass der Clip übermäßig weit geöffnet wird. (Abb.3)

(Abb. 2)

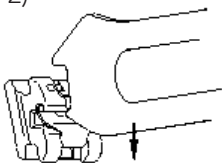


(Abb. 3)



3. Zum Schließen schieben Sie den Clip mit einem Finger oder mit der Innenseite der langen Spitze am gebogenen Teil des Clips hoch. (Abb. 4)

(Abb. 4)

gebogener Teil

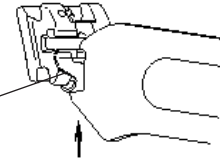

#### 4. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Wichtige grundlegende Warnungen

1. Nur für kieferorthopädische Zwecke
2. Anwendung nur durch Fachpersonal.
3. Verwenden Sie das Instrument nicht, wenn Sie Deformationen oder Schäden am Produkt feststellen. Informieren Sie die Kundenbetreuung.
4. Die Edelstahlklinge des Instruments enthält Nickel und kann somit allergische Reaktionen hervorrufen.
5. Das Instrument ist bei Lieferung nicht steril. Sterilisieren Sie das Instrument nach der Reinigung in einem Autoklaven ( $\leq 121^{\circ}\text{C}$ ) oder Ethylengassterilisator. Die Heißluftsterilisation ist für den Griff nicht geeignet.
6. Entfernen Sie nach dem Kleben des Brackets überschüssiges Klebermaterial bevor Sie den Clip öffnen.

#### 5. LAGERUNG

Außerhalb der Reichweite von Nicht-Fachpersonal aufbewahren.

#### 6. VERPACKUNG

Inhalt 1 Stück

 **GC Orthodontics Europe GmbH**

Harkortstraße 2  
58339 Breckerfeld  
Germany



Distributed by:

**GC Orthodontics Europe GmbH**

Harkortstraße 2  
58339 Breckerfeld  
Germany

**GC Orthodontics America Inc.**

Alsip, IL 60803  
USA