



FR


Notice d'utilisation Ortho Chain

Attention

1. Usage unique seulement
2. Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie au polyuréthane, tel que les réactions de peau.

1. STRUCTURE et CONFIGURATION

1. Composant: Polyuréthane

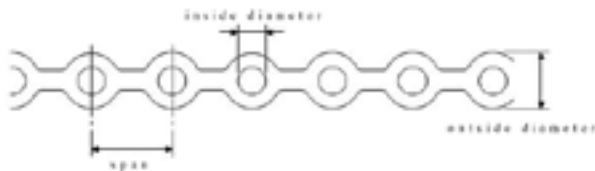

Dimensions

	Epaisseur	Diamètre externe	Diamètre interne	Entraxe
Entraxe court	0.2mm	2.8mm	1.4mm	3.0mm
	0.3mm			
	0.4mm			
	0.6mm			
Entraxe moyen	0.2mm	2.8mm	1.4mm	3.6mm
	0.3mm			
	0.4mm			
	0.6mm			

2. PERFORMANCE, BUT, EFFET OU EFFICACITÉ

Ce produit élastomérique est utilisé pour les mouvements et la rétention des dents avec des appareils dans les traitements orthodontiques.

3. INSTRUCTIONS DE POSE

Coupez à une longueur appropriée, entourez les ailettes du brackets ou le crochet, la force de traction est appliquée.

4. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Afin d'éviter les risques d'infection, coupez la longueur nécessaire auparavant.
2. Pour la traction, utilisez une élongation de 2 -2.5 fois de la taille initiale. Ne pas appliquer de traction trop importante sur les dents.

5. PRÉCAUTIONS D'USAGE

Précaution de base importante

1. Ne pas utiliser pour un autre usage que l'orthodontie.
2. Doit être manipuler par un professionnel habilité.
3. Ne pas utiliser en cas de détérioration ou déformation apparente. Contactez votre revendeur.
4. Si une réaction allergique apparaît, arrêter l'utilisation du produit et diriger le patient vers un spécialiste.

6. DÉFAUT ET ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Le produit utilisé est susceptible de provoquer une déformation, la détérioration ou la réduction de la résistance et provoquer une infection.

7. STOCKAGE

1. ne doit pas être utilisé par une personne non habilitée
2. stocker à l'abrit de la lumière et des rayons du soleil, des UV, source de chaleur et moisissure.

8. DATE D'EXPIRATION

La date d'expiration se trouve sur l'étiquette.

 **GC Orthodontics Europe GmbH**

Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld
Germany

 0086

Distributed by:

GC Orthodontics Europe GmbH

Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld
Germany

GC Orthodontics America Inc.

Alsip, IL 60803
USA