



DE


Gebrauchsanweisung Ortho Chain

WARNUNG

1. Nur zum einmaligen Gebrauch
2. Nicht bei Patienten mit bestehender Allergie gegen Polyurethan anwenden (z.B. Reaktionen der Haut)

1. ZUSAMMENSETZUNG UND AUFBAU

Material: Polyurethan

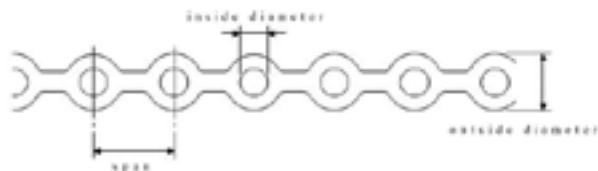

Abmessungen

	Dicke	Außen-durch-messer	Innen-durch-messer	Spann-weite
Kurze Spannweite	0.2mm	2.8mm	1.4mm	3.0mm
	0.3mm			
	0.4mm			
	0.6mm			
Mittlere Spannweite	0.2mm	2.8mm	1.4mm	3.6mm
	0.3mm			
	0.4mm			
	0.6mm			

2. EINSATZ, VERWENDUNGSZWECK, AUSWIRKUNG ODER WIRKSAMKEIT

Dieses Produkt besteht aus elastischem Material und wird zur Bewegung von Zähnen und Verankerung anderer orthodontischer Hilfsmittel in der kieferorthopädischen Behandlung verwendet.

3. Gebrauchsanweisung

Schneiden Sie die benötigte Länge ab und hängen Sie die Kette mittels eines geeigneten Instruments Ihrer Wahl am Bracket (Flügel oder Häkchen) oder einem anderen kieferorthopädischen Attachment so ein, dass die Kette unter Spannung steht und somit ihre Zugkräfte entwickeln kann.

4. VORSICHTSMAßNAHMEN BEZÜGLICH DES GEBRAUCHS

1. Um Infektionsrisiken zu vermeiden, schneiden Sie im Vorfeld die benötigte Länge zurecht.
2. Um die Zugkräfte der Kette zu aktivieren, dehnen Sie diese maximal um das 2 – 2,5fache der Ursprungslänge. Vermeiden Sie zu starken Zug auf die Zähne auszuüben.

5. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Wichtige grundlegende Warnungen

1. nur für kieferorthopädische Zwecke
2. Anwendung nur durch Fachpersonal
3. Bei Deformation oder Schäden am Produkt, nicht verwenden. Informieren Sie die Kundenbetreuung.
4. Bei allergischen Reaktionen des Patienten die Kette sofort entfernen. Den Patienten an einen Allergologen verweisen.

Achtung:

Bereits verwendete Ketten können verformt, beschädigt und ohne Spannkraft sein sowie Infektionen verursachen.

6. LAGERUNG

Art der Aufbewahrung

1. Außerhalb der Reichweite von Nicht-Fachpersonal aufbewahren.
2. An einem dunklen Ort lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung, Hitze und Feuchtigkeit schützen.

7. HALTBARKEIT

Vor dem auf dem Etikett angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum verwenden.

*Ablaufdatum im Format: JJMMTT.



GC Orthodontics Europe GmbH

Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld
Germany



Distributed by:

GC Orthodontics Europe GmbH

Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld
Germany

GC Orthodontics America Inc.

Alsip, IL 60803
USA

