

EXPERIENCE ceramic

Hinweise zum Klebe-Prozess


- Die Vorbereitung von Zähnen und Brackets sowie das Positionieren und Befestigen der Brackets sollte der standardisierten Vorgehensweise entsprechen.
- Für die Verarbeitung, Applikation und Aushärtung des Klebers sind die Herstelleranweisungen zu befolgen.
- Zusätzliche Empfehlungen:
 1. Applizieren Sie den Kleber großzügig auf die Basis.
 2. Arbeiten Sie den Kleber in die Basis ein um Luft einschließen zu vermeiden und die Basis komplett zu bedecken.
 3. Nachdem das Bracket endgültig positioniert ist, entfernen Sie rundherum alle Kleberüberschüsse.

Hinweise zum Entfernen der Brackets




1

Entfernen Sie die Bögen.

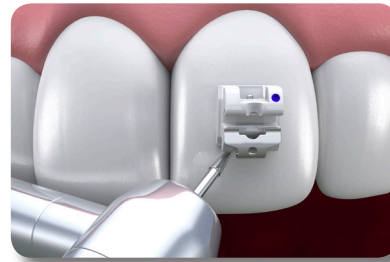



2

Entfernen Sie den Kleberüberschuss am Bracket, sofern dies nicht bereits beim Kleben geschehen ist.

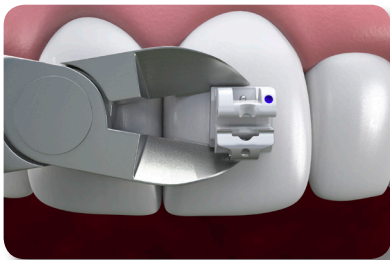

3

Mit einem geeigneten Instrument unterhalb der Basis ansetzen. Gingival-inzisal oder diagonal abheben, dabei die Basis-Abschrägung nutzen.

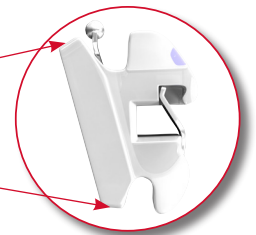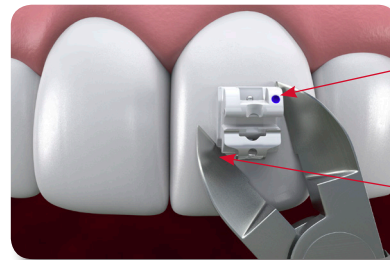

Gingivale und inzisale Basis-Abschrägung zur leichteren Entfernung.



4

Entfernen Sie alle verbliebenen Kleberreste und reinigen Sie die Zahnoberfläche.