

EXPERIENCE ceramic


Protocole de pose

- La préparation des dents, le placement et le positionnement des brackets doivent être effectués en concordance avec les protocoles de pose standards.
- La préparation des matériaux de collage, son application ainsi que sa photo polymérisation doivent être effectuées en accord avec les instructions données par le fabricant du produit de collage.
- La mise en œuvre que nous suggérons est:
 1. Appliquez librement le produit de collage sur la surface complète de la base du bracket.
 2. Pressez l'adhésif sur la base pour éliminer les bulles d'air et assurer un recouvrement uniforme.
 3. Retirez/Nettoyez tout excès d'adhésif sur le contour du bracket après son placement sur la dent.


Protocole de dépose




1
Ouvrir le clip soit par le dessus, soit par la face et retirer l'arc.

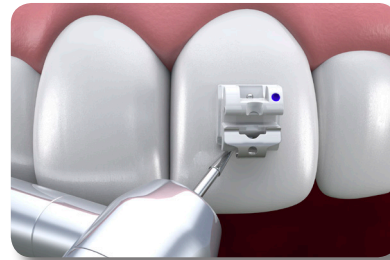


2
Retirez les excès de colle si vous ne l'avez pas fait durant la pose

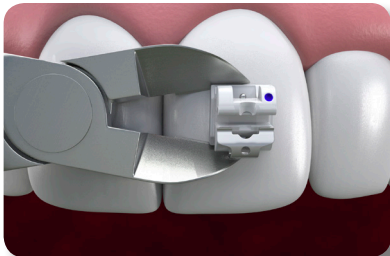


3
Utilisez un instrument adapté à la base du bracket, en occluso-gingival. La base du bracket est chanfreinée pour faciliter l'opération.

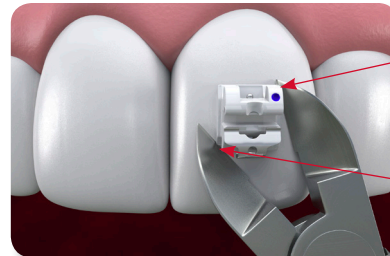

3
ou aux angles opposés occluso-gingival

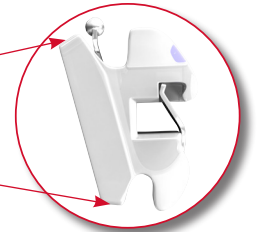

4
Nettoyer les dents des résidus de colle

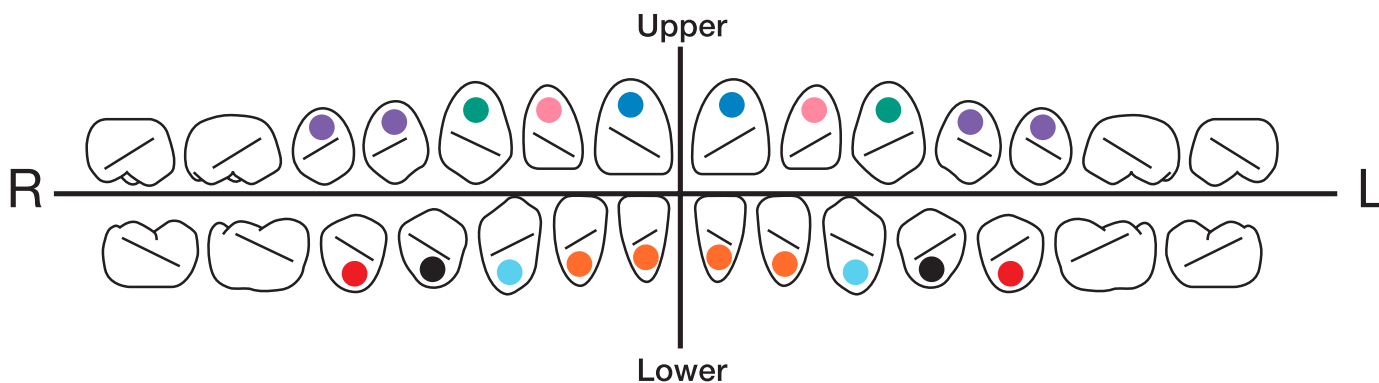

Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Réservé aux professionnels de santé. Lire attentivement la notice ou les indications sur l'étiquette avant utilisation. Fabriqué par GC Europe.

GC Orthodontics Europe GmbH
Harkortstrasse 2
D-58339 Breckerfeld
Germany

Direction commerciale
 Parc d'Activités des Petits Carreaux
 9 bis Avenue du Bouton d'Or
 BP 166
 F-94384 Bonneuil sur Marne Cedex
 Tél. : 01 77 45 65 61
 Fax : 01 49 56 16 38
 info-fr@gcorthodontics.eu
 www.gcorthodontics.eu

GC